

Testset: Parasiten

ORY ANALYSIS – STUHLTEST



Unbeliebte Mitbewohner

Zu den Darmparasiten, die uns Menschen betreffen können, zählen neben Würmern wie z.B. einigen Fadenwürmern, Saug- oder Bandwürmern, aber auch eine Reihe von Einzellern wie z.B. Amöben oder Lamblien. Der Weg in unseren Körper verläuft oft unbemerkt durch verunreinigte Nahrungsmittel oder verunreinigtes Wasser. Meist nehmen wir hierbei die Eier oder Larven auf, die dann in unserem Verdauungstrakt heran wachsen. Viele Parasiten kommen eher in den

Tropen vor, andere wie der Fuchsbandwurm oder der Kindermadenwurm sind weltweit verbreitet. Eine Infektion mit Darmparasiten kann sich ganz unterschiedlich äußern. Es kann zu Durchfall, Gewichtsverlust, Fieber oder allgemeiner Schwäche kommen.

Parasiten-Profil erstellen

Beschwerden, die von einer Infektion mit Darmparasiten verursacht werden sind oft sehr unspezifisch und gleichzeitig sehr unterschiedlich. Einige Infektionen verlaufen komplikationslos und unauffällig, andere äußern sich durch Fieber, Durchfall und Gewichtsverlust. Nach einem längeren Aufenthalt in tropischen Gebieten beispielsweise, kann es ratsam sein, sich auf Darmparasiten testen zu lassen. Ory Analysis bietet verschiedene Testsets, die mit Hilfe molekulargenetischer Nachweismethoden (PCR) sowohl Einzeller, als auch Würmer in allen Stadien diagnostizieren.

Was wird untersucht?

Bandwürmer, Spulwürmer, Madenwürmer, Hakenwürmer, Zwergbandwürmer, Peitschenwürmer, Zwergfadenwürmer, Enterocytozoonspp. / Encephalitozoon spp., Blastocystis, Dientamoeba. fragilis, Giardialamblia, Cryptosporidium spp. , Cyclosporacayetanensis, Entamoeba histolytica

TESTANLEITUNG:



ÜBERPRÜFEN

- Anforderungsbogen
- Anleitung zur Durchführung
- Stuhlauffanghilfe
- 2 Probenröhrchen mit in den Deckel integriertem Löffel
- 2 Transportröhrchen
- Postversandkarton + Klebestreifen zum sicheren Verschließen



TESTANLEITUNG

- Legen Sie die beiliegende Stuhlauffanghilfe in die Toilettenschüssel (je nach Badinstallation können Sie zur Unterstützung noch Zeitungspapier darunter platzieren)
- Fangen Sie Ihren Stuhlgang damit auf
- Entnehmen Sie mit dem Löffel an mehreren Stellen Proben und befüllen Sie beide Probenröhrchen damit.
- Die Füllhöhe sollte zwischen dem markierten min. und max. liegen. Der Löffel darf bei der Probenentnahme nicht mit dem WC in Kontakt kommen, da Putz- & Desinfektionsmittel das Ergebnis verfälschen können
- Schrauben Sie den Deckel (samt Löffel) wieder auf die Röhrchen und stecken Sie die Röhrchen in die kurzen Transportröhrchen und verschrauben Sie diese.



VERPACKEN UND VERSENDEN

Bitte geben Sie die Probenröhrchen in die Transportröhrchen und zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Versandtasche und bringen diese zum Briefkasten oder zum Postamt. Versandtasche muss nicht mehr frankiert werden.

Wichtiger Hinweis: Bitte nicht am Freitag (Wochenende) oder vor Feiertagen versenden!



Geschafft! Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihre Ergebnisse vorliegen.

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“

Arthur Schopenhauer